

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|                      | <p style="text-align: center;">CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE</p> <p style="text-align: center;">ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</p> | Código: EQ 1.2        |
|   |  | Edición: PRIMERA      |
|   |  | Fecha: Diciembre 2021 |
|   |  | Página: 1 de 9        |
|   |  | Vigencia: 3 años      |
| <b>MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE<br/>CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.</b> |  |                       |

## MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.

| ELABORADO   | REVISADO   | APROBADO  |
|---|--|---|
| Marcelo Vera Zúñiga<br>Encargado de mantenimiento<br>CESFAM José Joaquín Aguirre<br>Ilustre Municipalidad de Calle<br>Larga | Dina Guerra Campos<br>Encargada de Calidad<br>CESFAM José Joaquín Aguirre<br>Ilustre Municipalidad de Calle<br>Larga | Natalia Rios Rojas<br>Directora<br>CESFAM José Joaquín Aguirre<br>Ilustre Municipalidad de Calle<br>Larga |
| 02/12/2021  | 03/12/2020   | 03/12/2021  |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|                             | <p style="text-align: center;">CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE</p> <p style="text-align: center;">ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</p> | Código: EQ 1.2        |
|  |  | Edición: PRIMERA      |
|  |  | Fecha: Diciembre 2021 |
|  |  | Página: 2 de 9        |
|  |  | Vigencia: 3 años      |
| <p><b>MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE<br/>CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.</b></p> |  |                       |

## 1- Introducción

Es de suma importancia mantener en buen estado los equipamientos del CESFAM para poder entregar una atención segura y de calidad, especialmente aquellos equipamientos relevantes como lo es el DEA, monitor desfibrilador y monitores hemodinámicos. Para poder cumplir con este objetivo y asegurar la continuidad y buen funcionamiento de estos equipos es necesario realizar un seguimiento de su vida útil y por este motivo es que en CESFAM José Joaquín Aguirre se ha dispuesto el manual de seguimiento de vida útil de equipamiento relevante.

## 2- Objetivos

Objetivo General:

Describir el seguimiento de vida útil que se le debe realizar al equipamiento relevante de CESFAM José Joaquín Aguirre y Posta de salud Rural de San Vicente.

Objetivos Específicos:

- Definir el procedimiento para realizar el seguimiento de vida útil del equipamiento relevante.
- Definir la periodicidad de los seguimientos.

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|                      | <p style="text-align: center;">CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE</p> <p style="text-align: center;">ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</p> | Código: EQ 1.2        |
|   |  | Edición: PRIMERA      |
|   |  | Fecha: Diciembre 2021 |
|   |  | Página: 3 de 9        |
|   |  | Vigencia: 3 años      |
| <b>MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE<br/>CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.</b> |  |                       |

### 3-. Alcance

Se aplicará al monitor desfibrilador del CESFAM José Joaquín Aguirre y al de Posta de Salud Rural de San Vicente, monitor desfibrilador de urgencias y Monitores hemodinámicos.

### 4-. Responsable de la ejecución

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Mantenedor                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsable de realizar el seguimiento de los equipamientos relevantes.</li> <li>• Informar a Encargada de equipamiento o Miembros del equipo directivo sobre el malfuncionamiento o desperfecto de algún equipamiento relevante.</li> </ul> |
| Encargado de equipamientos | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar mantenimientos correctivos en caso de ser necesarios.</li> <li>• Gestionar compra de nuevos equipamientos en caso de ser necesario.</li> </ul>   |

### 5-. Definiciones

**DEA:** Monitor desfibrilador automático externo. Este dispositivo administra una descarga eléctrica al corazón a través de la pared torácica. Sus sensores integrados analizan el ritmo cardiaco del paciente, determina cuando es necesaria la descarga y la administra de manera automática.

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|                             | <p style="text-align: center;">CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE</p> <p style="text-align: center;">ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</p> | Código: EQ 1.2        |
|  |  | Edición: PRIMERA      |
|  |  | Fecha: Diciembre 2021 |
|  |  | Página: 4 de 9        |
|  |  | Vigencia: 3 años      |
| <p><b>MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE<br/>CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.</b></p> |  |                       |

## 6-. Desarrollo

El seguimiento de la vida útil de los equipamientos relevantes de CESFAM José Joaquín Aguirre y posta de salud rural de San Vicente se realizará de manera trimestral y debe cumplir con las siguientes actividades:

DEA:

- Chequear indemnidad y fecha de vigencia de parches desfibriladores.
- Revisión de contacto entre desfibrilador y parches.
- Revisión del comando de voz.

Monitor desfibrilador:

- Revisión de pantalla
- Revisión de indemnidad de cables
- Revisión de toma de presión
- Revisión de saturación
- Revisión de frecuencia cardíaca

Monitores hemodinámicos

- Revisión de pantalla
- Revisión de indemnidad de cables
- Revisión de toma de presión
- Revisión de saturación
- Revisión de frecuencia cardíaca

## Registro

Se dejará registro del seguimiento de la vida útil de los equipamientos en planillas que serán almacenadas en la unidad de equipamiento (anexo 1).

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|                             | <p style="text-align: center;">CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE</p> <p style="text-align: center;">ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</p> | Código: EQ 1.2        |
|  |  | Edición: PRIMERA      |
|  |  | Fecha: Diciembre 2021 |
|  |  | Página: 5 de 9        |
|  |  | Vigencia: 3 años      |
| <p><b>MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE<br/>CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.</b></p> |  |                       |

## 7.- Distribución

- a. Dirección del establecimiento
- b. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente
- c. Subdirecciones del establecimiento
- d. Encargado de mantenimiento.

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|                      | <p style="text-align: center;">CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE<br/>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</p> | Código: EQ 1.2        |
|   |   | Edición: PRIMERA      |
|   |   | Fecha: Diciembre 2021 |
|   |   | Página: 6 de 9        |
|   |   | Vigencia: 3 años      |
| <b>MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE<br/>CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.</b> |   |                       |

## 8.- ANEXOS

### Anexo 1

#### Seguimiento de vida útil de DEA

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Fecha                                  |  |  |  |  |  |
| Indemnidad de los parches              |  |  |  |  |  |
| Fecha de vigencia de los parches       |  |  |  |  |  |
| Contacto entre desfibrilador y parches |  |  |  |  |  |
| Revisión de comando de voz             |  |  |  |  |  |
| <b>Responsable de revisión</b>         |  |  |  |  |  |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|                      | <p style="text-align: center;">CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE<br/>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</p> | Código: EQ 1.2        |
|   |   | Edición: PRIMERA      |
|   |   | Fecha: Diciembre 2021 |
|   |   | Página: 7 de 9        |
|   |   | Vigencia: 3 años      |
| <b>MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE<br/>CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.</b> |   |                       |

**Seguimiento monitor desfibrilador**

|                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fecha                                |  |  |  |  |  |
| Revisión de pantalla                 |  |  |  |  |  |
| Revisión de indemnidad de los cables |  |  |  |  |  |
| Monitor toma la presión              |  |  |  |  |  |
| Monitor toma la saturación           |  |  |  |  |  |
| Monitor toma la frecuencia cardiaca  |  |  |  |  |  |
| <b>Responsable de revisión</b>       |  |  |  |  |  |

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
|                             | <p style="text-align: center;">CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE<br/>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</p> | Código: EQ 1.2        |
|  |   | Edición: PRIMERA      |
|  |   | Fecha: Diciembre 2021 |
|  |   | Página: 8 de 9        |
|  |   | Vigencia: 3 años      |
| <p><b>MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE<br/>CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.</b></p> |   |                       |

**Seguimiento de vida útil de Monitor hemodinámico**

|                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fecha                                |  |  |  |  |  |
| Revisión de pantalla                 |  |  |  |  |  |
| Revisión de indemnidad de los cables |  |  |  |  |  |
| Monitor toma la presión              |  |  |  |  |  |
| Monitor toma la saturación           |  |  |  |  |  |
| Monitor toma la frecuencia cardiaca  |  |  |  |  |  |
| <b>Responsable de revisión</b>       |  |  |  |  |  |

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|                      | <p style="text-align: center;">CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE</p> <p style="text-align: center;">ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</p> | Código: EQ 1.2        |
|   |  | Edición: PRIMERA      |
|   |  | Fecha: Diciembre 2021 |
|   |  | Página: 9 de 9        |
|   |  | Vigencia: 3 años      |
| <b>MANUAL DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO RELEVANTE<br/>CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE.</b> |  |                       |

## 9-. Tabla de Modificaciones

| Edición número | Motivo del cambio        | Fecha de aprobación |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| Primera        | Elaboración de Documento | 01-12-2021          |
| Segunda        |                          | Día de mes de año   |
| Tercera        |                          | Día de mes de año   |